

## Zahřívací gelový polštářek

**Kód zboží: 04095495**

Návod k použití:

Gelový zahřívací polštářek aktivujeme několikerým stisknutím kovového plíšku, který je uvnitř gelového polštářku.

Pro lepší aktivaci posuňte kovový plíšek do rohu polštářku.

Tekutý gel se začne zahřívát do 10 sekund na teplotu cca 55 °C a polštářek se díky krystalizaci změní do pevného stavu.

Gelový polštářek udrží teplotu po dobu cca 30 minut.

Poté, co polštářek dokonale vychladne, omotejte jej do utěrky a vložte do vařící vody po dobu 5 - 10 minut. Krystalizace se začne měnit do původní gelové podoby, tím je připraven k dalšímu použití.

Zahřívací proces se dá aplikovat až 500 x.

Dodavatel: AHC-BONN-PRAHA sro, Luštěnická 672, Praha 9, Tel.: 286854392, E-mail: [info@ahc-bonn.cz](mailto:info@ahc-bonn.cz)