


# Alkohol Tester HA-01L

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za nákup zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod

Alkoholtester HA-01L je moderní elektronický detektor alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Je ideální pro orientační dechovou zkoušku řidičů, do autoškol, příp. pro kontrolu zaměstnanců apod. Přístroj je vybaven třístupňovou indikací. Pro funkci přístroje nejsou třeba žádné další náplně, tedy nemusíte dokupovat jakékoli další trubičky nebo kapsle atd.

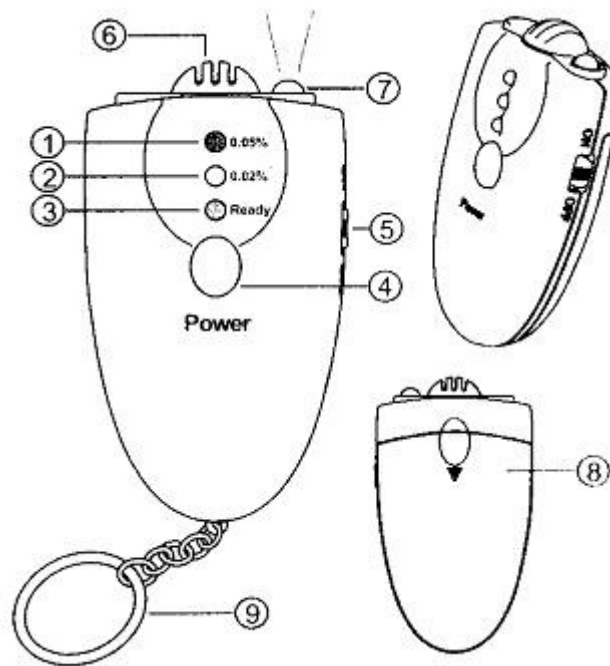

## Popis

1. červený indikátor >0,05 %
2. žlutý indikátor >0,02 %
3. zelený indikátor READY - připraveno
4. vypínač POWER
5. vypínač svítilny
6. dechový analyzátor
7. LED dioda svítilny
8. kryt prostoru baterií
9. řetízek ke kroužku na klíče

## Obsah balení


- alkoholtester HA-01L
- 6 x náustek
- návod

## Upozornění

Indikace slabých baterií: pokud se přístroj automaticky vypíná nebo svítilna slabě svítí, vyměňte, baterie za nové

Pro použití doporučujeme kvalitní alkalické baterie s dlouhou životností


## Vložení baterií

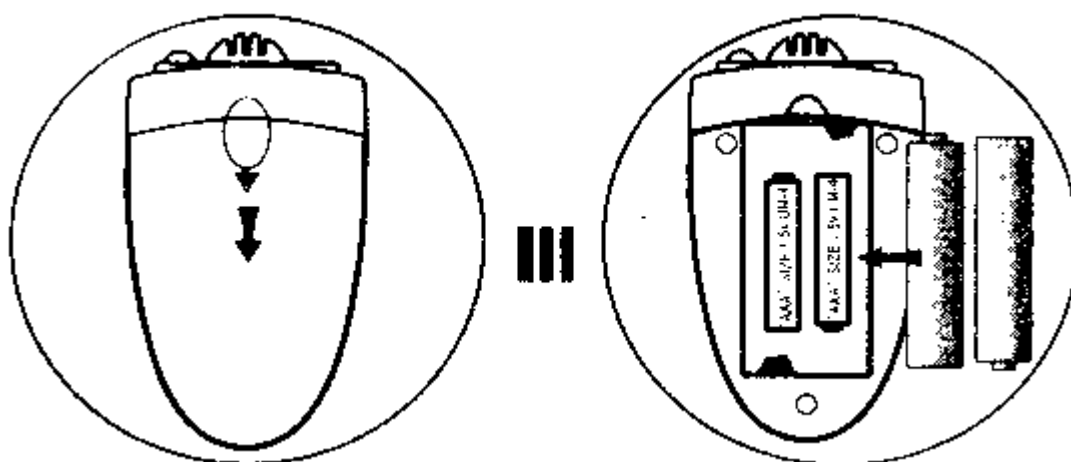

Zatlačte na víčko pouzdra baterií na zadní přístroje v místě označeném vylisovaným trojúhelníkem a tahem dolů kryt sejměte. Vložte 2 ks alkalických baterií typ AAA ve správné polaritě. Zasuňte víčko pouzdra baterií zpět

## Použití přístroje


Před použitím přístroje nepijte a nekuřte, min. 20 min. Nepoužívejte přístroj po požití alkoholu, může dojít ke zničení senzoru a ztrátě záruky! Před měřením si vypláchněte ústa vodou

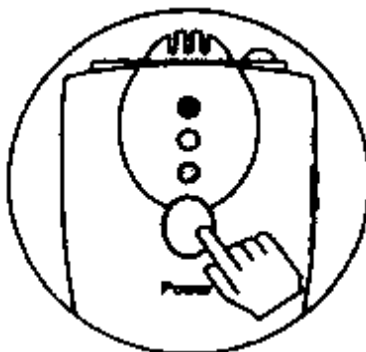


1. Stiskněte a po celou dobu měření držte tlačítko 4 - POWER na přední straně. Rozsvítí se oranžová i červená kontrolka a aktivuje se zahřívání senzoru, případně se rovnou rozsvítí

zelená kontrolka, viz. 2. Zahřívání může trvat až 15 sekund, při prvním použití po dlouhé době i déle

2. Od okamžiku, kdy se rozsvítí zelená kontrolka, je přístroj připraven k měření během 3-5 sekund. Foukejte ze vzdálenosti cca 5cm od úst přibližně 3-5 sekund do mřížky (6) na přístroji. Snažte se dodržet uvedenou vzdálenost úst od přístroje a foukejte rovnoměrně

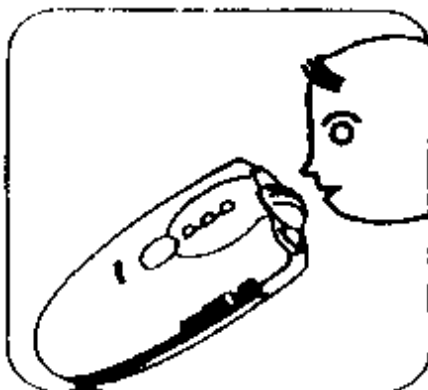

3. Přístroj provede analýzu a zobrazí výsledek měření
4. Pokud je zjištěna vyšší hodnota než 0.05 % / 0.5 ‰, rozsvítí se červený a žlutý LED indikátor
5. Pokud je zjištěna vyšší hodnota než 0.02 % / 0.2 ‰, ale menší než 0.05% / 0.5 ‰ rozsvítí se žlutý LED indikátor
6. Pokud je zjištěna nižší hodnota než 0.02 % / 0.2 ‰, zůstane svítit zelený LED indikátor

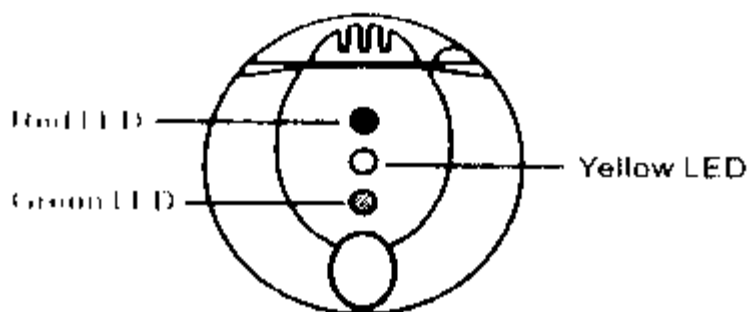

7. Uvolněte tlačítko 4 - POWER, přístroj se vypne
8. Pro další test přístroj zapněte znovu tlačítkem na přední straně přístroje a opakujte kroky 1-7 výše  
Pokud při zkoušce opakované krátce po sobě přístroj nedetekuje žádný alkohol, vyčkejte cca 10-20 minut a zkoušku proveďte znovu
9. Pro obdržení co nejpřesnějšího výsledku, dechové měření alkoholu v krvi je vždy jen orientační opakujte měření 2-3 krát

## Použití svítilny

LED dioda svítilny se zapíná a vypíná posuvným vypínačem. Nezapínejte svítilnu před nebo v průběhu měření množství alkoholu

## Technické parametry

Měřicí rozsah přístroje:	0 - 1,0 ‰ BAC, přesnost 0,1 ‰
Napájení:	2 x AAA mikrotužková baterie
Displej:	3 x LED
Měřená hodnota:	pásmo 0 - 0,2 ‰, 0,2 - 0,5 ‰ a > 0,5 ‰ alkoholu v krvi
Cyklus měření:	< 30 sekund zahřívání < 5 sekund zobrazení výsledku
Dechový vzorek:	3 - 5 sekund nepřetržitého foukání na senzor
Hmotnost:	cca 20 g bez baterií
Rozměr	73 x 39 x 20 mm

AHC-BONN-PRAHA sro  
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely  
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393  
E-mail: [info@mojenakupy.cz](mailto:info@mojenakupy.cz)  
[www.MojeNakupy.cz](http://www.MojeNakupy.cz)